

POSTUP TESTOVÁNÍ DĚTÍ LEPU TESTY ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ZA ASISTENCE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

- 1. Zákonný zástupce přichází na testování v respirátoru a dítě v roušce.**
- 2. Před testováním si každý vydesinfikuje ruce**
- 3. Dohlížející osoba informuje zákonné zástupce o průběhu odběru.**
- 4. Zákonný zástupce obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty**
- 5. Zákonný zástupce sundá dítěti roušku a provádí odběr:**
 - Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.**
 - Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení odběru**
- 6. Dle pokynů dohlížejícího pedagoga zákonný zástupce pokračuje k vyhodnocení testu:**
 - Otevře vyhodnocovací kartu**
 - Vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů**
 - Odstraňuje lepicí proužek**
 - Dohlížející pedagog nakape 6 kapek přiloženého roztoku**
 - Zákonný zástupce otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře kartu a lehce přimáčkne**
- 7. Dohlížející pedagog spouští odpočet času k vyhodnocování v délce 15 minut.**
- 8. Zákonný zástupce s dítětem čekají před budovou MŠ na výsledek.**